



COOO SÌ SUPER CON FUTAR®

REGISTRAZIONE OCCLUSALE







KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent










FUTAR® – LA FAMIGLIA AD ALTE PRESTAZIONI

Arcata dentale

 Materiale per registrazione oclusale	 Miscelazione	 Tempo di lavorazione a 23 °C	 Tempo di permanenza nel cavo orale	 Tempo di presa totale*	 Durezza (ca.) Shore
Futar®		30 s	90 s	2:00 min	A 90
Futar® Easy		30 s	90 s	2:00 min	A 90
Futar® D		30 s	90 s	2:00 min	D 43
Futar® D Slow		90 s	3:00 min	4:30 min	D 43

* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione.

Segmento

 Materiale per registrazione oclusale	 Miscelazione	 Tempo di lavorazione a 23 °C	 Tempo di permanenza nel cavo orale	 Tempo di presa totale*	 Durezza (ca.) Shore
Futar® Fast		15 s	45 s	1:00 min	A 90
Futar® Easy Fast		15 s	45 s	1:00 min	A 90
Futar® D Fast		15 s	45 s	1:00 min	D 43

* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione.

**REGISTRAZIONE
OCCLUSALE IN UN
SOLO MINUTO!**

FUTAR® – SEMPLICEMENTE IMPRESSIONANTE!

Registrazione oclusale

La famiglia di prodotti **Futar®** comprende sette diversi materiali per la registrazione oclusale a base di silicone A, per l'esatta registrazione delle condizioni oclusali.

SUPER IN QUALITÀ

- Per registrazioni oclusali precise

SUPER GRAZIE ALLA VERSATILITÀ

- Potete scegliere tra durezza finali elevate e ultraelevate, nonché tra diversi tempi di lavorazione!

SUPER IN AFFIDABILITÀ E CONTINUITÀ

- Provato e testato molte volte con qualità sempre affidabile

**Non accettate compromessi nella
registrazione oclusale!**



FUTAR® – PANORAMICA DEI VANTAGGI

Futar® / Futar® Fast:

- Elevata durezza finale (Shore-A 90)
- Flessibilità di lavorazione: facile da tagliare con il bisturi
- Disponibile anche in versione a presa rapida per un maggiore comfort del paziente!

Futar® Easy / Futar® Easy Fast:

- Elevata durezza finale (Shore-A 90)
- Bassa resistenza al morso
- Facile da tagliare con il bisturi
- Disponibile anche in versione a presa rapida
- Poca forza per l'erogazione – facilmente applicabile



La famiglia di prodotti
Futar® offre ancora di più:

Futar® D / Futar® D Fast:

- Durezza finale ultraelevata (Shore-D 43)
- Ottima lavorabilità con la fresa
- Disponibile anche come variante Fast: per un maggiore comfort del paziente!



Futar® D Slow:

- Durezza finale ultraelevata (Shore-D 43)
- Tempo di lavorazione extra- lungo per applicazioni complesse, ad es. per la registrazione oclusale miocentrica, il fissaggio di pilastri per impronta o la riproduzione individuale dei margini
- Impiego versatile anche nel laboratorio



- Risultati esatti grazie alle eccellenti caratteristiche di fluidità
- La bassa elasticità riduce l'effetto gommoso nell'attribuzione dei modelli
- Le parti in eccesso possono essere comodamente rimosse

**APPLICAZIONE
SEMPLICE,
PULITA E
RAPIDA!**

FUTAR[®] – ASSORTIMENTO



Products	Normal pack 2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, azzurri	Bonus pack 10 cartucce da 50 ml, 30 puntali di miscelazione, azzurri
Futar [®]	REF 1191211	REF 2827711
Futar [®] Fast	REF 1192611	REF 2827611
Futar [®] Easy	REF 1192311	–
Futar [®] Easy Fast	REF 1192411	–
Futar [®] D	REF 1193211	REF 2827811
Futar [®] D Fast	REF 1196111	REF 2827911
Futar [®] D Slow	REF 1195111	–
Puntali di miscelazione	50 pezzi	100 pezzi
Puntali di miscelazione blu, Ø 6,0 mm	REF 17244	REF 17246

APPUNTI

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.it



062795_1024

Non per l'uso la vendita e la
distribuzione in Germania.



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent