




Sistema di  
cartucce modificato

Sistema di  
cartucce modificato

COOO SÌ PRECISO È PANASIL®

IMPRONTA DI PRECISIONE

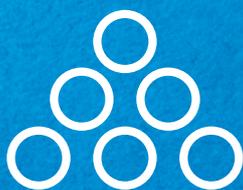

KETTENBACHDENTAL  
Simply intelligent

# PRECISIONE SENZA COMPROMESSI

## Materiale per impronta di precisione (silicone A)

La famiglia di prodotti **Panasil**<sup>®</sup> comprende materiali innovativi perfettamente coordinati tra loro per tutte le tecniche di impronta e le indicazioni.

### IMPRONTA SIMULTANEA



Sistema di  
cartucce modificato

**Panasil**<sup>®</sup> tray Soft Heavy

**GRADEVOLE VISCOSITÀ ELEVATA**



**Panasil**<sup>®</sup> initial contact Light

**A BASSA VISCOSITÀ, GENIALMENTE IDROFILO**



# PER QUALSIASI TECNICA E QUALSIASI INDICAZIONE

## DOPPIA IMPRONTA



IL PREFERITO



Sistema di  
cartucce modificato

**Panasil® tray Fast Heavy**

**BREVE TEMPO DI PRESA**



**Panasil® Putty Fast**

**BUON RAPPORTO  
PREZZO-PRESTAZIONI**



Sistema di  
cartucce modificato

**Panasil® binetics Putty Fast**

**VERO PUTTY, SI PRESTA  
MOLTO BENE AL TAGLIO**



**Panasil® initial contact X-Light**




**Panasil® contact plus X-Light**

**A BASSISSIMA VISCOSITÀ**

**GENIALMENTE IDROFILO**

**RAPIDO TEMPO DI PRESA**

=

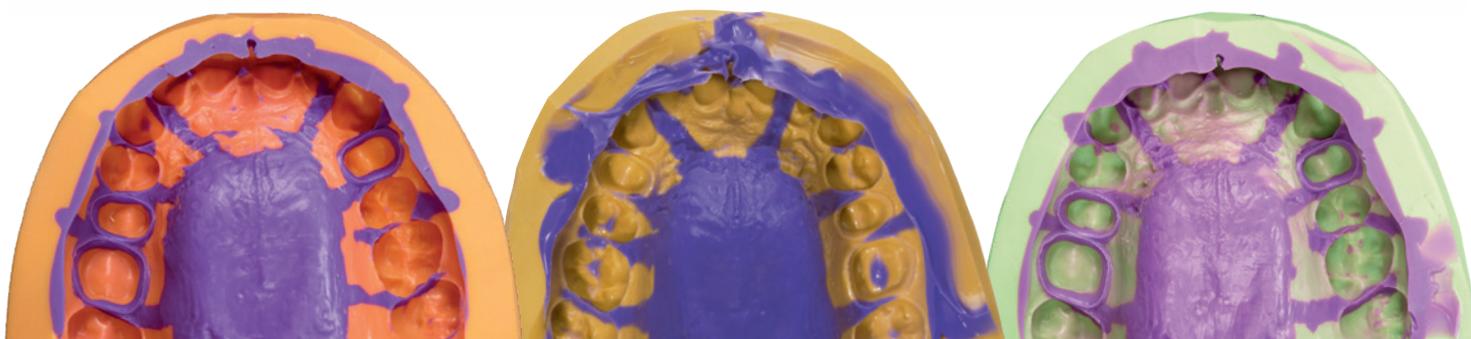



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

## IMPRONTA A SANDWICH



Sistema di  
cartucce modificato

**Panasil®**  
binetics Putty Soft


**Panasil®** Putty Soft

**FACILMENTE IMPASTABILE, STABILE**



**Panasil®** initial contact Light

**A BASSA VISCOSITÀ,  
GENIALMENTE IDROFILO**

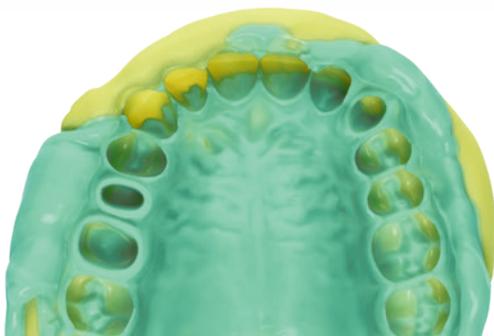

## IMPRONTA MONOFASICA



Sistema di  
cartucce modificato

**Panasil®** monophase Medium

**DUREZZA FINALE ELEVATA**



**Panasil®** monophase Medium

**DUREZZA FINALE ELEVATA**




# ECCEZIONALE IDROFILIA FIN DAL PRIMO ISTANTE

## Misurazione dell'angolo di contatto

(parametro per l'idrofilia di un materiale)

Quanto più piatte sono le gocce, tanto più marcata è l'idrofilia del materiale

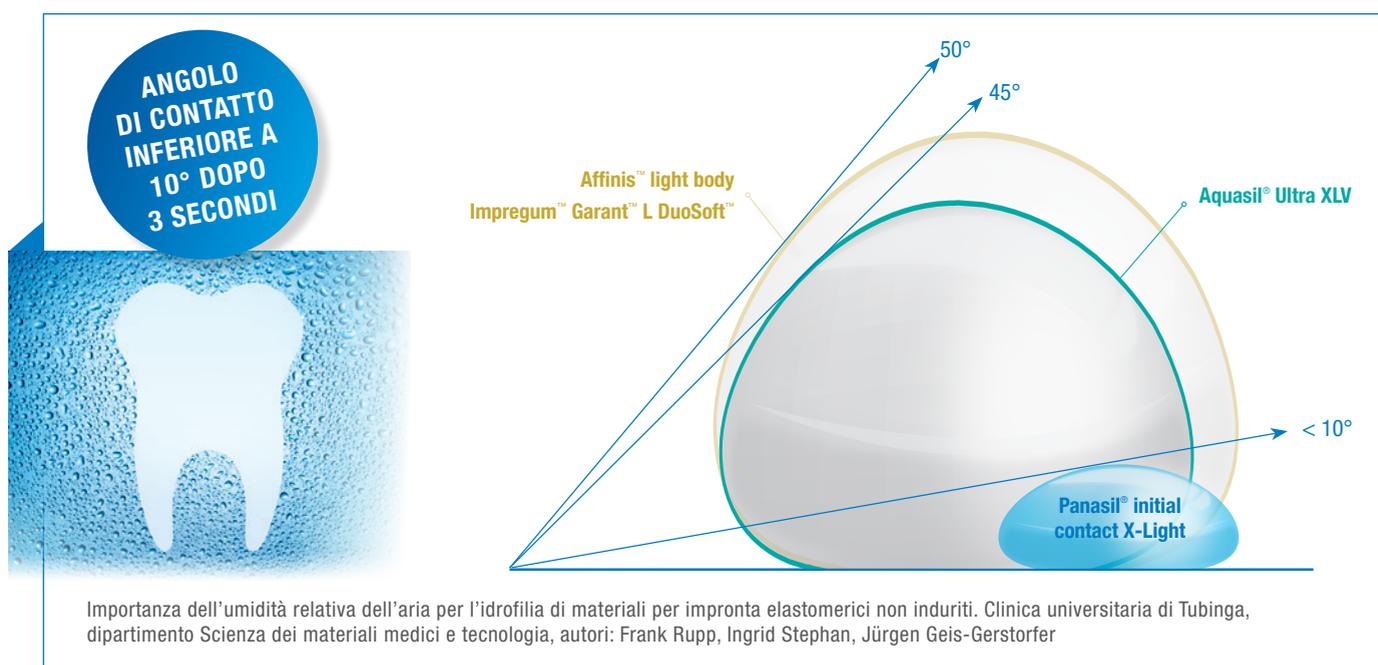

**Panasil® initial contact** mostra una diffusione estremamente rapida della goccia d'acqua e, nel confronto con la concorrenza, raggiunge l'angolo minimo di contatto dopo 3 secondi.

## ECCELLENTE IDROFILIA



- **Panasil® supera** immediatamente qualsiasi problema di **umidità residua** al contatto diretto con la superficie del dente e assicura un risultato preciso.



- **Panasil®** garantisce l'eccellente riproduzione dei margini di preparazione anche in **situazioni estreme**, quali ad es. difficoltà di emostasi.

# PANASIL® – ASSORTIMENTO

	Panasil® Putty	Panasil® Putty Soft	Panasil® Putty Fast
<b>PUTTY</b>	<b>Intro pack</b>	–	REF 11120
		Base paste da 200 ml, catalyst paste da 200 ml, 2 cucchiari dosatori	
	<b>Normal pack</b>	REF 11101	REF 11121
	Base paste da 450 ml, catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiari dosatori		
<b>Economy pack</b>	REF 11103	REF 11123	REF 11143
	4 base paste da 450 ml, 4 catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiari dosatori		
	<b>Panasil® binetics Putty Soft</b>		<b>Panasil® binetics Putty Fast</b>
<b>Refill pack</b>	REF 14703		REF 14701
	2 cartucce da 380 ml		

	Panasil® tray Soft Heavy	Panasil® tray Fast Heavy	Panasil® tray Soft Heavy Fast
<b>HEAVY</b>	<b>Refill pack</b>	REF 14707	REF 14705
		2 cartucce da 380 ml	
<b>Normal pack</b>	REF 13541	REF 13551	REF 13561
	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi		

	Panasil® monophasse Medium	
<b>MEDIUM</b>	<b>Refill pack</b>	REF 14709
		2 cartucce da 380 ml
<b>Normal pack</b>	REF 13501	
	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi	

	Panasil® initial contact X-Light/ X-Light Fast	Panasil® initial contact Light/ Light Fast	Panasil® initial contact Regular
<b>LIGHT</b>	<b>Normal pack</b>	REF 13401/ REF 13461	REF 13411 / REF 13471
		2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi
<b>Bonus pack</b>	REF 28300 / –	REF 28310 / –	–
	10 cartucce da 50 ml, 40 puntali di miscelazione, grigi		
	<b>Panasil® contact plus X-Light</b>		
<b>Normal pack</b>	REF 11891		
	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi		

Tutte le cartucce da 380 ml e 50 ml sono disponibili in un sistema di cartucce modificato.

## APPUNTI

---



---



---



---



---

Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Phone +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.it



062793\_0525



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent