

SEMPLICE ABBINAMENTO CROMATICO

WITH **VISALYS® FILL** & **VISALYS® FLOW**

NOVITÀ



FLEX
SHADE
SYSTEM

Il **FLEX SHADE SYSTEM** consente di lavorare
in modo efficiente con soli **7 COLORI**
per i restauri estetici

**VEDERE
RETRO**



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

SEMPLICE ABBINAMENTO CROMATICO GRAZIE AL FLEX SHADE SYSTEM

Qui è possibile trovare i **colori principali Visalys® Fill & Visalys® Flow** a sinistra e gli **abbinamenti ottimali dei colori Vita¹** a destra

COLORI DEI PRODOTTI

A1

LIGHT BRIGHT

A2

BRIGHT

A3

MEDIUM BRIGHT



A3.5

MEDIUM DARK

A4

DARK

DENTI VITA (incl. otturazione da colori Visalys® Fill)¹⁾

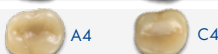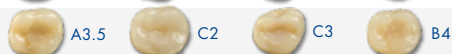


In caso di colore particolarmente chiaro dei denti, utilizzare il colore **BL²⁾**

COLORI DEI PRODOTTI

BL

WHITE

DENTI VITA (incl. otturazione da colore Visalys® Fill BL)²⁾

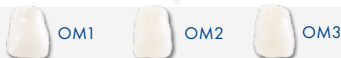

In presenza di cavità decolorate, è sufficiente coprire con **OA2**

COLORI DEI PRODOTTI

OA2

OPAQUE

DENTI VITA (incl. otturazione da colori Visalys® Fill)¹⁾



Strato 1: otturazione con Visalys® Fill colore **OA2**
Strato 2: otturazione con Visalys® Fill colore **A1**

Strato 1: otturazione con Visalys® Fill colore **OA2**
Strato 2: otturazione con Visalys® Fill colore **A4**



Qui è possibile trovare
**OTTURAZIONI IN
DENTI UMANI**



**MAGGIORI
INFORMAZIONI**



¹⁾ Otturazioni di classe 1 in denti protesici, ad es. con Visalys® Fill per dimostrare la coerenza del Flex Shade Systems.

²⁾ Otturazioni di classe 4 in denti protesici, ad es. con Visalys® Fill per dimostrare la coerenza del Flex Shade Systems.